


ハードコルセット(前開き) 使用説明書

【コルセットのつけ方】

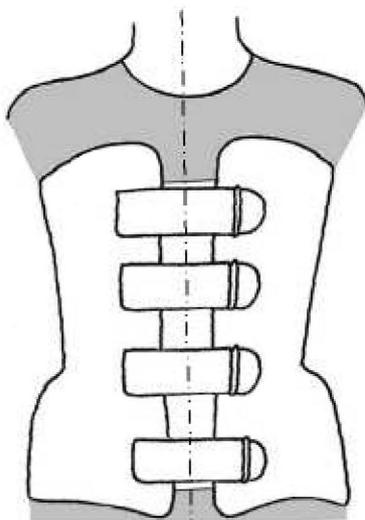

① コルセットは肌着やTシャツの上から装着します。
直接つけると、摩擦により傷ができてしまうことがあるので、肌に直接あたらないようにして下さい。

② コルセットには前と後ろがあります。
前後を確認して下さい。

③ おへその中心がコルセットの中心になります。

④ マジックベルトを外し、身体に装着します。


⑤ 一度つけたら、コルセットを下に押し、骨盤の位置でしっかり身体に合わせます。

⑥ コルセットがずれないために、マジックベルトはしっかり締めて下さい。特に一番下のベルトはきっちり締めて下さい。

⑦ いすに座ったときに、コルセットの下縁が、太もものつけねに食い込まない程度の位置に装着して下さい。

⑧ 上縁はワキに当たらないか確認して下さい。

●コルセットの上から下着とズボンをかぶせて履いていただくと、トイレの際に楽です。

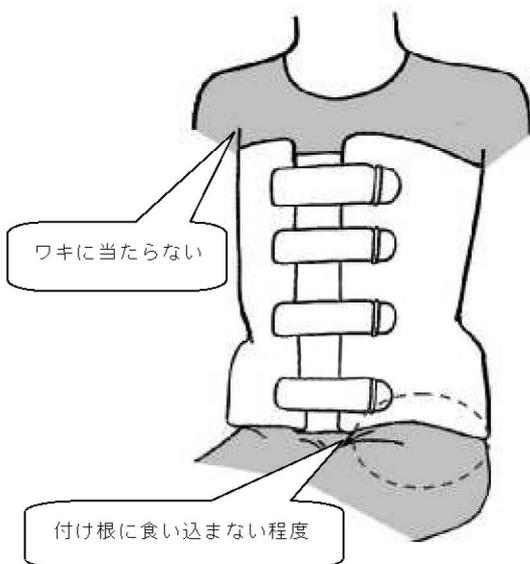

(株) 田村義肢製作所

〒060-0034

札幌市中央区北4条東5丁目5-64

TEL: 011-200-2777

【ご使用の注意点】

- ・コルセットは医師の処方に基づき製作されています。
- ・ご使用に関しては、医師もしくは義肢装具士の指示に従い、装着して下さい。
- ・コルセットの長さは個人の必要に応じて決められています。
- ・傷や痛みがある場合、医師または担当の義肢装具士にご相談下さい。